

Simple OFF care

シンプル オフ ケア

使用説明書

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読み下さい。

- ご使用前に必ずこの使用説明書をよく読み、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- 使用説明書に記載された使用方法や注意事項を必ず守ってください。
使用方法を誤ると感染症や角膜炎などの重い眼障害の原因となることもあります。
また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- ご使用中のコンタクトレンズの取り扱いについてはレンズの取扱説明書をよく読み、使用方法等を守ってください。

コンタクトレンズを使用していると、涙に含まれる脂質やタンパク質、化粧品による汚れなどがレンズに付着します。Simple OFF careはこのような頑固で落ちにくいレンズの汚れをしっかりと洗浄します。毎日のレンズケアですっきりクリアな視界で快適な毎日をお過ごしください。

特長

- 1 各種ソフト・O₂・ハードコンタクトレンズに使用でき、オルソケラトロジーレンズにも対応！※1
- 2 頑固で落ちにくいレンズの汚れをしっかりと洗浄！

ご使用方法

レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手指をきれいに洗ってください。

【ソフトコンタクトレンズの場合】



1 レンズの両面に本剤を1～2滴落としてください。
容器底部をプッシュして滴下してください。



2 人さし指の腹で一定の方向に軽くこするようにして(片面20回程度)レンズの両面を洗浄してください。




3 レンズのヌルヌルした感じがなくなるまで生理食塩水またはソフトレンズ用すすぎ液や保存液などで十分にすすいでから装用(消毒・保存)してください。


⚠ 過酸化水素タイプ(エーオーセプトクリアケアなど)で消毒する場合、特によくすすいでください。すすぎが不十分のまま過酸化水素タイプの消毒剤を使用すると、過剰に発泡することがありますのでご注意ください。

【O₂・ハードコンタクトレンズの場合】

1 レンズの両面に本剤を1～2滴落としてください。
容器底部をプッシュして滴下してください。

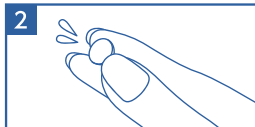

2 指先で軽くこするようにして(20回程度)レンズの両面を洗浄してください。

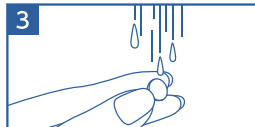

3 レンズのヌルヌルした感じがなくなるまで水道水で十分にすすいでから装用(保存)してください。

※1 ケアについての注意事項などは、使用しているコンタクトレンズの添付文書等に従ってください。

⚠ 使用上の注意

1. レンズを取り扱う前には、必ず石けんなどで手指をきれいに洗ってください。
2. 本剤は洗浄液で、消毒剤ではありません。
ソフトコンタクトレンズの場合、別途ソフトコンタクトレンズ用の消毒剤を使用してケアをおこなってください。
3. 本剤にレンズを浸漬したり、他のケア用品に混ぜて使わないでください。
4. 本剤で処理したレンズを装用中、眼に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、眼科医の診察を受けてください。
5. 本剤が、衣服や皮ふに付いた場合は水道水でよく洗い流してください。
6. 混濁したものや変色したものは使用しないでください。
7. 本剤が誤って眼に入った場合は直ちに大量の水道水でよく洗い流し、眼科医の診察を受けてください。
8. 万一、本剤を服用してしまった場合は多量の水を飲ませて、医師の診察を受けてください。
9. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。

保管および取扱い上の注意

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 滴下口へは衛生上触れないようにしてください。
3. 使用後はキャップをしっかりとめて、直射日光を避け、室温で保管してください。
4. 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
5. 容器を開封したら、すみやかに使用してください。
6. 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

成分

主成分：イソプロパノール※2、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤
※2 製品成分特有のアルコール性のおいがあります。

本剤に関するお問い合わせ

オフテクスお客様相談室

0120-021094

受付：月～金（祝日は除く）9:00～17:00

発売元

HOYA株式会社

製造元

株式会社 オフテクス

兵庫県神戸市中央区港島南町 5-2-4



この説明書は読みやすいイワタ
UD (ユニバーサルデザイン)
フォントを使用しています。